

# Návod

## NUPRO PROPHYLAXS PASTE

Leštící pasta

### UPOZORNĚNÍ

Pouze pro použití ve stomatologii.

### Tato informace se týká následujících balení produktu:

200 individuálních 2g kalíšků \* nebo

100 individuálních 2g kalíšků (Variety Pack) nebo

340g kelímek

\*(kalíšky s jemnou pastou váží 1,9g)

- **Jemná pasta – kalíšky**

Orange (pomerančová) – 801235

- **Střední – kalíšky**

Mint (mátová) – 801223

- **Hrubá – kalíšky**

Mint (mátová) – 801213

- **Plus - kalíšky**

Mint (mátová) – 801299

- **Hrubá – kelímek**

Orange (pomerančová) – 801111, Mint (mátová) – 801112, Cherry (třešňová) – 801171, Tropical fruit (s chutí tropického ovoce) – 801141, Grape (s chutí hroznového vína) – 801127

- **Střední – kelímek**

Mint (mátová) – 801122, Tropical fruit (s chutí tropického ovoce) – 801151, Grape (s chutí hroznového vína) – 801126

NUPRO je leštící pasta bez fluoru.

### Profylaktická pasta NUPRO je k dostání v následujících hrubostech:

F – fine = jemná (žlutá)

Ideální pro mladší pacienty

M – medium = střední (modrá)

Pro vysoký lesk

C – coarse = hrubá (červená)

Pro kuřáky

P – plus (zelená)

### INDIKACE

Leštění povrchu zubu .

## **SLOŽENÍ**

Profylaktická pasta NUPRO obsahuje pemzu (s výjimkou velmi jemné), glycerin, křemelinu (velmi jemná), sodnou sůl sacharinu, vodu, křemičitan sodný, aroma, barvivo, pojivo a konzervační látky. Toto složení určuje pastu k použití na leštění zubů během ošetření ve stomatologické praxi.

## **KONTRAINDIKACE**

Pasta NUPRO se nesmí používat u pacientů se známou alergií na jakoukoli její složku.

## **VAROVÁNÍ**

- Pasta NUPRO může dráždit oči. Dojde-li ke kontaminaci očí pastou, vyplachujte je okamžitě dostatečným množstvím vody po dobu 15min. Pokud dráždění přetrvává, zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Pasty NUPRO smí používat pouze lékař nebo proškolený zdravotnický personál
- Během používání pasty noste ochranné brýle a rukavice

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

Při používání kelímků si potřebné množství pasty oddělte do vhodné nádoby. V individuálních kalíšcích je dostatečné množství pasty k ošetření jednoho pacienta.

Profylaktický kartáček nebo kalíšek naplňte pastou tak, že jej za nízkých otáček vtlačíte do kalíšku s pastou.

Používejte vždy dostatečné množství pasty, aby nedocházelo k přehřívání zubu. Polykání pasty a jejímu přílišnému rozpouštění v ústech zabráníte použitím savky.

## **SKLADOVÁNÍ**

Kelímky po použití ihned uzavřete, aby nedocházelo k vysychání pasty.

Neskladujte při teplotách vyšších než 25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem.

## **VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE**

Nepoužívejte po datu expirace.

Výrobní číslo je vyznačeno v souladu s požadavky na identifikaci produktu.