



PURE Single Bond

PURE Single Bond je světlem tuhnoucí víceúčelové jednosložkové lepidlo

Složení: Methakryláty, Polyalkenoát methakrylizovaný

Indikace:

- Lepení kompozitních a kompomerních materiálů na přírodní sklovinu a dentin
- Zubní výplně.
- Utěsnění citlivých zubních krčků
- Lepení keramických a kompozitních částí.
- Kompozitní materiály na keramiku
- Kompozitní materiál na kompozitní materiál
- Kompozitní materiál k kovům a amalgámu

Kontraindikace:

Nepoužívejte pokud existuje alergie na kteroukoli ze složek PURE Single Bond. Neplikujte pokud místo nelze dobře izolovat při leptání sklovinu, během aplikace a vytvrzování PURE Single Bond. Pokud je ústní hygiena pacienta nedostatečná.

Vedlejší účinky

Složky obsažené v PURE Single Bond mohou vést k větší senzibilitě u pacientů.

Interakce s jinými agenty

Fenolové a jiné látky (např. Oxid zinečnatý-eugenol), které inhibují polymeraci, nesmí přijít do styku s PURE Single Bond. Kontaminace leptané sklovinu (např. Sliny) neutralizuje adhezivní účinek PURE Single Bond.

Aplikace

- Přímá aplikace bondu na povrchy
- Lepení inlay a onlay, dých a korun
- Lepení jiných dentálních materiálů

1. Přípravné práce a přípravy / restaurování

Leptadlo (např. PURE Etching Gel 37% kyselina ortofosforečná) se nanáší přímo ze stříkačky na všechny povrchy sklovinu a dentinu, které mají být použity pro leptání. Rovnoměrně rozetřete pomocí jednorázového štečku. Leptejte po dobu 15 sekund a poté důkladně opláchněte. Žádné stopy po leptací barvě by měly být viditelné na sklovině nebo na dentinu. Přebytečnou vodu z povrchu odstraňte sušením nebo vzduchem. Povrch zcela nevysušte, protože by se mohla případná kolagenová vrstva narušit a tím by se snížila přilnavost.

2. Aplikace bondu

Naneste jednu kapku PURE Single Bond na jednorázový kartáček a lehce naneste na povrchu zubu během 20 sekund. Lehce osušte na vzduchem. Vytvrzujte světlem po dobu 30 sekund.

První pomoc

Zabraňte nebezpečí polknutí použitím malého aplikačního kartáčku. V případě přímého kontaktu s ústní sliznicí stačí opláchnutí vodou z vodovodu. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka: Určeno pouze zubním lékařům a zubním technikům. Držte mimo dosah dětí!

Doba použitelnosti a značení: Datum použitelnosti a číslo šarže jsou vyznačeny na obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Úložný prostor: Skladujte při teplotě 4–23 ° C. Chraňte před přímým slunečním zářením.