

Opalescence® Endo

Popis:

Opalescence Endo je gel s obsahem 35% peroxidu vodíku vyrobený speciálně pro zdravotnické ošetření technikou walking bleach.

Indikace:

Opalescence Endo se používá na endodonticky ošetřené zuby se zbarvením vlivem onemocnění, poranění nebo medicínské léčby.

Postup:

Nejdůležitějším krokem při bělení nevitálních zubů je nenanášet bělicí materiál pod kost alveolárního hřebene a izolovat kořenový výplňový materiál, aby se zachoval jeho hermetický uzávěr.

1. Na rentgenovém snímku zkontrolujte, zda je výplň kořenového kanálku a apexu dostatečná, a výšku kosti alveolárního hřebene.
2. Zjistěte, jaká jsou očekávání pacienta. Vysvětlete mu, kam sahají možnosti této léčby.
3. Odstraňte všechnen výplňový materiál z trepanačního otvoru do úrovně určené rentgenovým snímekem. Všechnen výplňový materiál, provizorní a/ nebo kořenový výplňový materiál musí být odstraně tak, aby umožnil kontakt bělicího gelu s vnitřní strukturou zubu; pak je možné získat optimální výsledky.
4. Smíchejte obvyklý skloionomer v poměru prášek k tekutině tak, abyste vytvořili pevný tmel. (POZN.: Měl by být tak pevný, že jej můžete válet mezi palcem a prsty). Naneste vrstvu silnou 1-2mm, abyste zajistili utěsnění.
5. Na stříkačku nasadte kanylu White Mac a vytlačte Opalescence Endo do dřevné dutiny; zabraňte kontaktu s měkkými tkáněmi. Do gelu vložte tenkou bavlněnou peletku. Ponechte 1 až 1,5 mm prostoru na provizorní výplň. Opalescence Endo nenanásejte na měkké tkáně ústní dutiny. Pokud se přihodí, že se gel dostane do kontaktu se sliznicí, okamžitě opláchněte množstvím vody.
6. Uzavřete trepanační otvor provizorním výplňovým materiálem bez eugenolu, Ultradent doporučuje UltraTemp. Ověřte okluzní vůli v dopředných i laterálních pohybech čelisti pacienta. Prematurní okluzální kontakty mohou způsobit frakturu provizorní výplně a následně netěsnosti a ztrátě bělicího materiálu.
7. Postup opakujte každých 3 -5 dní, dokud nedosáhnete požadované změny barvy zubu.
8. Použité stříkačky řádně zneškodněte.
9. Před finální dostavbou zubu počkejte 8-10 dní. Tato doba dovolí ustálení odstínu.
10. Odstraňte provizorní výplňový a bělicí materiál do úrovně skloionomerního utěsnění. Trepanační otvor opláchněte a vyčistěte. Dostavte kompozitním materiálem metodou adheze.

Upozornění:

1. Doporučujeme zub mírně přebělít, protože zub po bělení opět mírně ztmavne.
2. Před začátkem ošetření se ujistěte, že rozumíte pacientovu očekávání.
3. Materiál není určen k injekční aplikaci.
4. Materiál skladujte v ledničce, aby vydržel po celou expirační dobu. Opalescence Endo chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
5. Použité stříkačky řádně zneškodněte.

6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Nepoužívejte u pacientů s alergií nebo citlivostí na peroxidy, karbopol, glycerín atd.
8. Zabraňte kontaktu Opalescence Endo s měkkými tkáněmi.
9. Informujte pacienty, aby byli opatrní a nepolykali gel. Výrobek obsahuje peroxid a požití velkého množství může být škodlivé.



Obr. 1 - otevřete přístup do dřeňové dutiny z lingvální strany. Odstraňte všechny výplňový materiál a gutaperču 2-3 mm apikálně k CEJ.



Obr. 2 – vytlačte Opalescence Endo do dřeňové dutiny, zabraňte kontaktu s měkkými tkáněmi. Do gelu vložte maličký smotek vaty. Ponechte dostatečný prostor na provizorní výplň.




Obr. 3 - trepanační otvor uzavřete provizorním výplňovým materiálem. Bělení opakujte každých 3 – 5 dní, dokud nedosáhnete požadované změny barvy



riziko pro zdraví



nepoužívat opakovaně – možnost křížové kontaminace

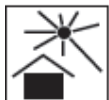

uchovávat mimo dosah tepla a slunečního záření




pouze pro profesionální použití



recyklovat



spotřebovat do data

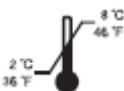

uchovávat v chladu



šarže



uchovávat mimo dosah dětí



katalogové číslo



číst návod



Ultradent Products GmbH
AM Westhofer Berg 30
51149 Cologne
Germany

Opalescence® Endo



Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA

Made in USA

For product SDS please
see our website:
www.ultradent.com

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2012 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 12701-UL10 071414



X026 = **LOT**

X026 = MM

X026 = YYYY

Uchovávejte v chladu.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pouze pro profesionální použití.

Rev. 02_2015

Hu-Fa Dental, a.s. – výhradní dovozce produktů Ultradent pro ČR i SR

HU-FA Dental, a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Česká republika, (tel: +420 577 926 226-9)

HU-FA Dental, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca, Slovenská republika, (tel: +421 41 433 10 16-17)