

Návod na použití mirafluor[®] -k-gel

Charakteristika:

- Pro prevenci zubního kazu s obsahem sodíku fluoridu
- Pro remineralizaci a hlubokou fluoridaci
- Obsahuje 0,615 % NaF

Domácí použití:

- Děti od 6 let by měli používat mirafluor-gel pro prevenci kazu maximálně jednou týdně.
- Gel o velikosti hrášku se vtírá do zubů pomocí zubního kartáčku po dobu přibližně 2 minut.
- Není vhodné pro děti mladší 6 let.

Použití v ordinaci:

- Gel se aplikuje pomocí pěnového nosiče (Mirafluor-Tray).
- Zajistěte dostatečnou dobu kontaktu gelu se zuby (alespoň 2 - 4 minuty).

Varování:

- Gel by neměl být polknut.
- Zvláštní opatrnost je nutná u osob, u kterých není zajištěna kontrola polykacího reflexu.
- Pro děti starší 14 let lze již použít mirafluor-gel s vyšší dávkou NaF.
- Skladujte v suchu.
- Chraňte před slunečním zářením.
- Dodržujte skladovací teploty od 0 do 28 °C.