

# Universal Dentin Sealant®

## Ochranná bariéra

### Popis:

Universal Dentin Sealant je biokompatibilní, nepolymerizovatelná, vysokomolekulární pryskyřice v etanolovém rozpouštědle.

**Indikace:** Universal Dentin Sealant uzavírá exponované tubuly dentinu a chrání před iritací způsobenou pryskyřemi, kyselinami, cementy a restorativními chemikáliemi. Může být zároveň použit jako konvenční lak na dutiny pod amalgámovými náhradami. Doporučuje se k pokrytí citlivých kořenů po root planingu a scalingu a zmírňuje pooperační citlivost.

### Použití:

1. Sejměte uzávěr ze stříkačky.
2. Bezpečně nasadte jednorázovou kartáčkovou kanylu.
3. Ujistěte se, že jsou zuby dobře izolované a suché.
4. Před intraorální aplikací ověřte průtok Universal Dentin Sealant.
5. Pro citlivé kořenové povrchy po root scalingu nebo pro ochranu kořenových povrchů před silnými chemikáliemi aplikujte tenkou vrstvu Universal Dentin Sealant na oblast a jemně ji vysoušejte vzduchem po dobu 5-10 vteřin.
6. Používáte-li přípravek jako lak na dutiny, naneste Universal Dentin Sealant na dno a stěny kavity a vyhněte se okrajům. Poté vysoušejte vzduchem po dobu 5-10 vteřin.

### Upozornění a varování:

1. Pozorně čtěte všechny instrukce před použitím Universal Dentin Sealant.
2. Určeno pouze pro odborníky.
3. Používejte pouze podle instrukcí.
4. Skladujte při pokojové teplotě.
5. Pryskyřice mohou být senzitivizující. Ujistěte se, že pacient netrpí žádnou známou alergií na používané materiály. Vyhněte se opakovanému kontaktu pryskyřice s pokožkou. Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na akryláty nebo jiné pryskyřice. Vyskytne-li se alergická reakce, dermatitida nebo vyrážka, vyhledejte lékaře.
6. Před intraorální aplikací vždy ověřte průtok materiálu. Při neprůchodnosti, vyměňte kanylu a zkontrolujte.
7. Izolujte silné chemikálie pouze na oblast zákroku.
8. Chemikálie se mohou v kanyle po několika hodinách usadit. Abyste zabránili ucpání, vyjměte kanylu a znovu mezi jednotlivými pacienty uzavřete.
9. Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.
10. Mezi jednotlivými pacienty znovu uzavřete, dezinfikujte a otřete stříkačku dezinfekcí určenou pro lékařské pomůcky. Používáte-li jednorázový kryt na stříkačku, odstraňte kanylu, znovu uzavřete a kryt stříkačky zlikvidujte.
11. Použité kanyly a prázdné stříkačky pečlivě zlikvidujte.
12. Kanyly jsou pouze jednorázové. Nepoužívejte je znovu, aby nedošlo ke kros-kontaminaci.
13. Chraňte před přímým slunečním světlem a teplem.
14. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Bezpečnostní list a další informace o Universal Dentin Sealant a souvisejících produktech najdete na [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)




hořlavý



spotřebujte do data



pouze pro profesionální použití

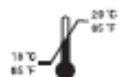

skladujte v pokojové teplotě



šarže



recyklovatelný



čtěte návod k použití



katalogové číslo



výrobce




nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci



zdravotní riziko

## Universal Dentin Sealant

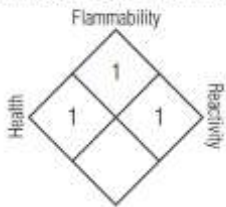

Stupnice rizika:

4 – velmi vážné 3 – vážné 2 – střední 1 – mírné 0 – minimální

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky

Písmeno značí výrobní šarži, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.

### Universal Dentin Sealant Protective Barrier

Shelf Life: 30 months.  
Store at room temperature.



Manufactured by:  
Ultradent Products, Inc.  
505 West 10200 South  
South Jordan, Utah 84095 USA  
Made in USA

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
10062-UG 001416



For product SDS please see our  
website: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)  
1-800-552-5512; 801-572-4293



X026 = LOT

X026 = MM

X026 = RRRR

Rev. 2 - 2017